

Guía de referencia rápida de auto-infección nasal

- Un profesional de la salud verificará la identificación de cada individuo y registro previo.
- Mientras se mantiene la distancia adecuada de seis pies o más para reducir la exposición al virus, un profesional de la salud colocará un kit de auto-inspección pre-etiquetado en una mesa cercana.
- Las pruebas son fácilmente autoadministradas. A una distancia segura, el profesional de la salud hará una breve demostración de la prueba y responderá a cualquier pregunta.



1 Abre el envoltorio del hisopo

2 Ponga el hisopo a mitad de camino en la nariz, rotar dos veces, y mantenerlo dentro para 15 segundos

3 Repita en la otra fosa nasal



4 Abre el tubo y pon el extremo blando del hisopo en el interior

5 Rompe la parte superior del bastoncillo de algodón y vuelve a colocar la tapa del tubo

6 Cuando termine, coloque el kit, el embalaje y el extremo roto del hisopo de nuevo en la mesa



FEMA